

# Gaza niejałowa 1 m<sup>2</sup>

Wyrób medyczny

Gaza niejałowa bawełniana 17- nitkowa o powierzchni 1 m<sup>2</sup>. Stosowana do opatrywania ran i urazów. Przeznaczona do sterylizacji.

## Instrukcja sterylizacji

Przepakować w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować czystym tlenkiem etylenu, w stężeniu 450÷800 mg/l w temperaturze 52-58°C, przez 6 godzin, w procesie zwalidowanym.

## Zawartość opakowania

1 szt. gazy.

## Informacje dodatkowe

Gaza nie jest produktem jałowym, dlatego nie należy jej stosować na rany, które wymagają sterylnego opatrunku.

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.

Wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.