

Koc ratunkowy

Wyrób medyczny

Zapewnia ochronę przed przegrzaniem lub wychłodzeniem organizmu, przed wiatrem i wilgocią. Stosowany przy udzielaniu pierwszej pomocy np. poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Sposób użycia

Koc należy wyjąć z opakowania, rozwinąć na całą szerokość, a następnie okryć osobę poszkodowaną.

Ochrona przed zimnem: okryć poszkodowanego srebrną stroną koca do ciała.

Ochrona przed przegrzaniem: okryć poszkodowanego złotą stroną koca do ciała.

Nie przykrywać twarzy. Brzegi koca można skleić plastrem, taśmą lub związać.

Nie stosować w przypadku, gdy osoba ma kontakt z urządzeniami lub mediami będącymi pod napięciem elektrycznym.

Zawartość opakowania

1 koc o wymiarach 210 cm x 160 cm.

Informacje dodatkowe

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o., wyprodukowano dla Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.