

Kompres żelowy

Wyrób medyczny

Przeznaczony do schładzania lub ogrzewania poszczególnych części ciała. Idealnie sprawdza się przy różnego rodzaju bólach, stłuczeniach oraz opuchliznach.

Sposób użycia

Zabieg zimnem

Kompres po przyłożeniu na newralgiczną część ciała powoduje obniżenie temperatury danego miejsca, co w konsekwencji przynosi długotrwałą ulgę. Idealnie sprawdza się przy wszelkiego rodzaju stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, niewielkich oparzeniach oraz przynosi ulgę w migrenach. U sportowców używany zaraz po kontuzji.

Zabieg ciepłem

Rozgrzany kompres ma działanie rozkurczowe co przynosi uczucie ulgi. Bardzo dobrze sprawdza się w bólach miesiączkowych, leczeniu przykurczów, bólach pleców, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach i skręceniach.

Zawartość opakowania

Kompres żelowy wielokrotnego użytku o wymiarach 26,5 x 10 cm, pokrowiec, instrukcja użytkowania.

Ostrzeżenia:

- Do użytku zewnętrznego.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Nie używać kompresu bezpośrednio na skórę (grozi odmrożeniem lub oparzeniem).
- Zaleca się nie stosować dłużej niż 20 min.
- Dzieci mogą korzystać z kompresu jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Produkt nie jest toksyczny, jednak nie należy wkładać go do ust.
- Produkt nie nadaje się do spożycia.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Dystrybutor

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin