

# Kompres żelowy

Wyrób medyczny

Przeznaczony do schładzania lub ogrzewania poszczególnych części ciała. Idealnie sprawdza się przy różnego rodzaju bólach, stłuczeniach oraz opuchliznach.

## Sposób użycia

### Zabieg zimnem

Kompres po przyłożeniu na newralgiczną część ciała powoduje obniżenie temperatury danego miejsca, co w konsekwencji przynosi długotrwałą ulgę. Idealnie sprawdza się przy wszelkiego rodzaju stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, niewielkich oparzeniach oraz przynosi ulgę w migrenach. U sportowców używany zaraz po kontuzji.

### Zabieg ciepłem

Rozgrzany kompres ma działanie rozkurczowe co przynosi uczucie ulgi. Bardzo dobrze sprawdza się w bólach miesiączkowych, leczeniu przykurczów, bólach pleców, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach i skręceniach.

## Zawartość opakowania

Kompres żelowy wielokrotnego użytku o wymiarach 26,5 x 10 cm, pokrowiec, instrukcja użytkowania.

## Ostrzeżenia:

- Do użytku zewnętrznego.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Nie używać kompresu bezpośrednio na skórę (grozi odmrożeniem lub oparzeniem).
- Zaleca się nie stosować dłużej niż 20 min.
- Dzieci mogą korzystać z kompresu jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Produkt nie jest toksyczny, jednak nie należy wkładać go do ust.
- Produkt nie nadaje się do spożycia.

## Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

## Dystrybutor

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin