

# Plaster tkaninowy z opatrunkiem

## 1 m x 8 cm

Wyrób medyczny

Przeznaczony do opatrywania niewielkich ran i skaleczeń. Dobrze dopasowuje się do ciała, jest wytrzymały, przepuszcza powietrze, co wspomaga proces gojenia. Produkt hipoalergiczny.

### Zawartość opakowania

Plaster o długości 1 m i szerokości 8 cm, do cięcia, dzięki czemu można dobrać odpowiednią wielkość i dobrze pokryć ranę.

### Sposób użycia

Stosować po zdezynfekowaniu rany. Wielkość odcinanego plastra należy dostosować do wielkości rany lub skaleczenia. Całe zranienie pokryć częścią z opatrunkiem. Po przyklejeniu przytrzymać części pokryte klejem przez kilka sekund dłońią, aby plaster dobrze przylegał do skóry.

Produkt jednorazowego użytku.

### Przeciwwskazania

Nie stosować na skaleczenia i rany wymagające sterylnego opatrunku oraz na poparzoną skórę.

### Informacje dodatkowe

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.

Wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.