

# Termofor gumowy z pokrowcem

Wyrób medyczny

Przeznaczony do miejscowego ogrzewania ciała, wspomagająco przy łagodzeniu różnych dolegliwości bólowych, stresu czy rozluźnianiu napiętych mięśni.

## Sposób użycia

Termofor należy napełniać wodą do około 2/3 jego objętości. Podczas napełniania trzymać termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy, by uniknąć rozpryskiwania się wody. Usunąć nadmiar powietrza z termoforu poprzez jego ostrożne przechylenie, do czasu pojawienia się wody przy otworze wlewowym. Z użyciem korka zakręcić termofor na tyle mocno i dokładnie, by uniemożliwić wyciekanie wody. Założyć pokrowiec.

Po użyciu zdjąć pokrowiec, odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia.

## Ostrzeżenia:

- Zawsze sprawdzać szczelność przed użyciem.
- Nie należy używać gotującej się (wrzącej) wody do napełniania termoforu.
- Używanie ciepłej wody bezpośrednio z sieci miejskiej (centralnego ogrzewania) może spowodować skrócenie żywotności wyrobu.
- Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.
- Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą.
- Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej.
- Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.
- Termofor zawiera naturalną gumę.

## Zawartość opakowania

Termofor gumowy o pojemności 2 l z pokrowcem.

## Informacje dodatkowe

Wyprodukowano dla Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.