

Helicobacter Test zakażenia układu pokarmowego

Wyrób medyczny

Szybki test z krwi do wykrywania zakażenia *Helicobacter Pylori*.

- Dokładność testu wynosi ponad 98%
- Szybki wynik w ciągu 15 minut
- Do samodzielnego wykonania w domu

Helicobacter Pylori (H.Pylori) jest bakterią bytującą w błonie śluzowej żołądka, która pozostaje przez dziesięciolecia często bez objawów klinicznych. Do zakażenia nią dochodzi zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Niektóre stany związane z obecnością tej bakterii mogą być przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a nawet raka żołądka.

Przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją użycia znajdującą się wewnątrz opakowania.

Wyrób do diagnostyki in vitro. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyrób do samokontroli.

Wykonanie testu

1. Nakłuj palec lancetem i pobierz próbkę krwi do pipety.
2. Nanieś próbkę krwi na pole testowe (S).
3. Dodaj roztwór testujący na pole testowe (D).

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie linie: jedna linia w obszarze kontrolnym (oznaczenie na teście C), a druga w obszarze testowym (T).

Wynik negatywny: pojawia się jedna linia w obszarze kontrolnym (C). Brak widocznej linii w obszarze testowym (T).

Wynik nieważny: nie pojawia się linia w obszarze kontrolnym (C).

Zawartość opakowania

1 płytkę testową i 1 pipetę, 1 fiolka roztworu testującego, 1 jałowa igła automatyczna do nakłucia palca, 1 wacik nasączony alkoholem, instrukcja użycia.

Informacje dodatkowe

Wyprodukowano przez:

DIAGNOSIS S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska.

Wyprodukowano dla:

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.