

Zestaw plastrów hipoalergiczných

Wyrób medyczny

Zestaw rekomendowany do samodzielnego opatrywania niewielkich ran i skaleczeń. Zestaw plastrów hipoalergiczných zawiera plastry w pięciu rozmiarach, przydatny w każdym domu. Plastry są hipoalergiczne - ograniczają ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, wytrzymałe, przepuszczają powietrze wspomagając gojenie, elastyczne - dostosowują się do kształtu ciała oraz nie przywierają do rany. Wyrób medyczny niejałowy, przeznaczony do opatrywania drobnych ran i skaleczeń.

Zawartość opakowania

20 plastrów w pięciu rozmiarach: 2 szt. 100 mm x 60 mm; 6 szt. 63 mm x 19 mm; 4 szt. 72 mm x 19 mm; 4 szt. 72 mm x 25 mm; 4 szt. 38 mm x 9 mm.

Sposób użycia

1. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
2. Przyklej plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
3. W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Zmieniaj plaster codziennie.

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany silnie sączące.

Środki ostrożności

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.

Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Informacje dodatkowe

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.

Wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.