

Zestaw plastrów turystycznych

Wyrób medyczny

Zestaw zawiera osiem rodzajów plastrów hipoalergiczných. Plastry są w różnych kształtach i rozmiarach, przezroczyste lub cieliste. W zestawie są zarówno plastry wodoodporne 3D, wodoodporne przezroczyste, piankowe na otarcia, jak i włókninowe. Wyrób medyczny niejałowy, przeznaczony do opatrywania drobnych ran i skaleczeń.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera plastry:

- wodoodporny 3D, 38x38 mm - 1 szt.
- wodoodporny 3D, 60x100 mm (do cięcia) - 1 szt.
- przezroczysty wodoodporny, 20x70 mm - 2 szt.
- przezroczysty wodoodporny, 20x60 mm - 2 szt.
- piankowy, 20x70 mm - 2 szt.
- cielisty, 20x70 mm - 8 szt.
- cielisty, Ø22,5 mm - 2 szt.
- włókninowe, 20x70 mm - 2 szt.

Sposób użycia

1. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
2. Przyklej plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
3. W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Zmieniaj plaster codziennie.

Środki ostrożności

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.

Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Przeciwwskazania: Nie stosować na rany silnie sączące.

Informacje dodatkowe

Paso-Trading Sp. z o.o., wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.