

# Zestaw plastrów uniwersalnych

Wyrób medyczny

Zestaw zawiera siedem rodzajów plastrów hipoalergicznym. Plastry są w różnych kształtach i rozmiarach; przezroczyste, cieliste lub włókninowe białe. W zestawie są plastry wodoodporne, piankowe na otarcia i duży włókninowy plaster do cięcia. Wyrób medyczny niejałowy, przeznaczony do opatrywania drobnych ran i skaleczeń.

## Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 26 plastrów:

- przezroczysty wodoodporny, 38×38 mm – 4 szt.
- przezroczysty wodoodporny, Ø25 mm – 4 szt.
- piankowy, 19×72 mm – 4 szt.
- cielisty, 9,5×38 mm – 4 szt.
- cielisty, 19×72 mm – 4 szt.
- cielisty, 25×72 mm – 4 szt.
- włókninowe (do cięcia), 60×100 mm – 2 szt.

## Sposób użycia

1. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego.
2. Przyklej plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
3. W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Zmieniaj plaster codziennie.

## Środki ostrożności

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.

Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Przeciwwskazania: Nie stosować na rany silnie sączące.

## Informacje dodatkowe

Paso-Trading Sp. z o.o., wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.