

Plastry hydrokoloidowe na pęcherze

Wyrób medyczny

Przynoszą ulgę w bólu i chronią zmienione chorobowo miejsce przed otarciami i podrażnieniem. Są dyskretne i wygodne w aplikacji, w 100% pokryte hydrokoloidem. Dopasowują się do kształtu ciała i znakomicie pokrywają pęcherze, tworząc optymalne środowisko do szybkiego gojenia. Funkcjonalne opakowanie zawiera trzy rodzaje plastrów, które można stosować na pęcherze stóp lub w innych miejscach ciała.

Zawartość opakowania

Plastry o wymiarach:

6,9 x 4,4 cm – dwie sztuki

6 x 2 cm – dwie sztuki

6,1 x 1,8 cm – dwie sztuki

Sposób użycia

1. Przed użyciem umyj i osusz ręce oraz miejsce, w którym zamierzasz nakleić plaster.
2. Chwyć za niesklejoną krawędź plastra i usuń biały papier zabezpieczający.
3. Trzymając folię ze strzałkami, przyklej plaster tak, aby hydrokoloid pokrywał pęcherz.
4. Usuń z plastra folię oznaczoną strzałkami, dociśnij krawędzie plastra i upewnij się, że dobrze przylegają do skóry.
5. Plaster pozostaw na skórze do momentu, aż sam zacznie się odklejać, jednak nie dłużej niż przez 7 dni. Aby kontynuować terapię wymień plaster na nowy.
6. Jeśli pęcherz pękł, zastosuj łagodny płyn antyseptyczny i nałóż kolejny plaster.
7. W celu usunięcia plastra, złap za krawędź i powoli pociągnij, aż do całkowitego odklejenia.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Środki ostrożności

- W przypadku cukrzycy i/lub chorób krążenia, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby ograniczyć ryzyko infekcji - nie przekłuwać pęcherza.
- Nie stosować na zainfekowany pęcherz.
- Nie przyklejać na włosy, brwi oraz wilgotną skórę.
- Nie używać, jeśli powierzchnie zewnętrzne plastra są uszkodzone lub zabrudzone.
- Wyrób do jednorazowego użytku – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem.

- Jeżeli podczas stosowania, okolice pęcherza stają się zaczerwienione, bolesne lub wystąpi reakcja alergiczna, należy skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od miejsc nasłonecznionych.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Po użyciu, wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Informacje dodatkowe

Importer: Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomska 48, 95-200 Pabianice

Wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin